

慢性期の痛みを緩和、関節の拘縮の改善、筋肉の緊張などに、リハビリ用温熱パック

一般医療機器(クラスI)



一般名称:温熱用パック(JMDNコード:37240010)

ホットパック-mie


●衛生管理に優れた耐熱・防カビ加工フィルム使用

●保温効果が高く、温めると柔らかく身体にフィット

患部にあわせて選べる3タイプのリハビリ用温熱パック。
加熱・蓄熱した温熱効果により患部を温め、
消炎鎮痛処置を行います。

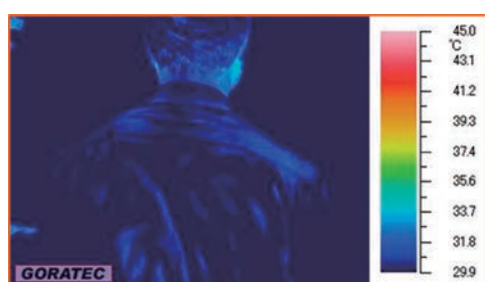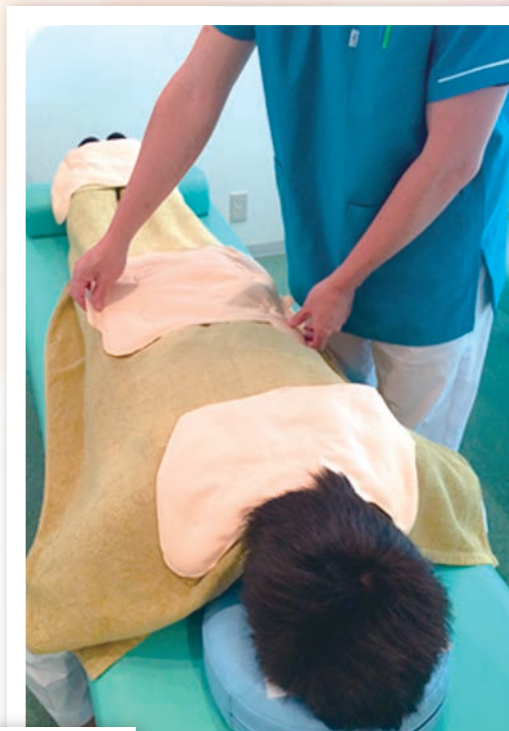

使用前

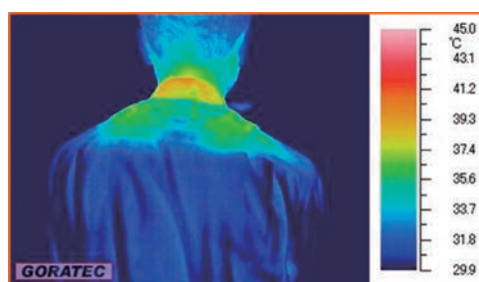

使用後(5分)

【品目使用】

本体袋：PVC(ポリ塩化ビニール)500 μ 厚、耐熱、防カビ

内容物：水、吸水性ポリマー、防腐剤

※ 電子レンジの加熱は絶対にしないで下さい。

※ 必ずタオルなどに包んで使用して下さい。

※ ホットパックの上に座ったり、身体の下に敷いて使用しないで下さい。

三重化学工業株式会社

医療機器許可：製造業(一般)、製造販売業(第3種)

〒515-0001 三重県松阪市大町262-1

TEL 0598-51-2361 FAX 0598-51-1143

<http://www.miekagaku.co.jp>

\ 選べる3タイプ!! /

届出番号 24B3X00004000001

ホットパック-mie H-1

(頸部・腕脚用)

サイズ 400mm×180mm 約 450g

定 価 2,300円 (税別)

1ケース 1個入り × 10函



届出番号 24B3X00004000002

ホットパック-mie H-2

(腰部・肩首用)

サイズ 430mm×225mm 約 750g

定 価 2,900円 (税別)

1ケース 1個入り × 10函



届出番号 24B3X00004000003

ホットパック-mie H-3

(腰部・背中用)

サイズ 450mm×280mm 約 1300g

定 価 4,600円 (税別)

1ケース 1個入り × 5函



使用方法

- ① 加温槽に65℃～80℃に温めたお湯をご用意ください。
- ② お湯の温度を65℃～80℃に保ち、本品をお湯に入れ10分～25分間温めてください。
- ③ 本品に損傷など無く液漏れが無いことを確認し、タオルなどで包み患部にあてがい適宜時間(15分～20分)患部を温めてください。火傷をしないように、十分ご注意ください。
- ④ 取扱いに際しましては、取扱い説明書をよくお読みください。

温め方	時 間
お湯 65～80℃	10～25分