

# 取扱説明書

ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。

## 三日月型冷却剤 くるっとクール


### 【特徴】

- 冷凍庫で冷却するだけで使用できます。
- 冷却しても柔軟性を保つゲルで患部に柔軟にフィットします。
- 頸部、腋下部、鼠径部等にフィットする形状で、患部をしっかり冷却します。
- 冷却性に優れた内容物を使用しています。

### 【使用方法】

- 冷凍庫の電源を入れてください。  
冷凍庫が冷えたら「くるっとクール」を庫内に入れ3~4時間ほど冷却してください。
- 冷凍庫の能力や「くるっとクール」の数量によって冷却時間は変化しますので、冷たさを確認しながら冷却してください。
- 冷却された「くるっとクール」を取り出し、破損、液漏れが無いか確認してください。
- 「くるっとクール」を専用のカバーに入れて下さい。
- カバーに入れた「くるっとクール」を患部に当てがい、適宜の時間患部を冷却してください。  
※直接肌に当てて使用する場合は医師の管理のもと、凍傷に十分注意してご使用ください。
- 使用後は付属のカバーから取り出し、汚れ・破損等の確認を行った後冷凍庫で再度冷却してください。
- 続けてご使用にならない場合も、汚れ、破損等の確認後、冷凍庫にて保管して下さい。

### 【使用例】

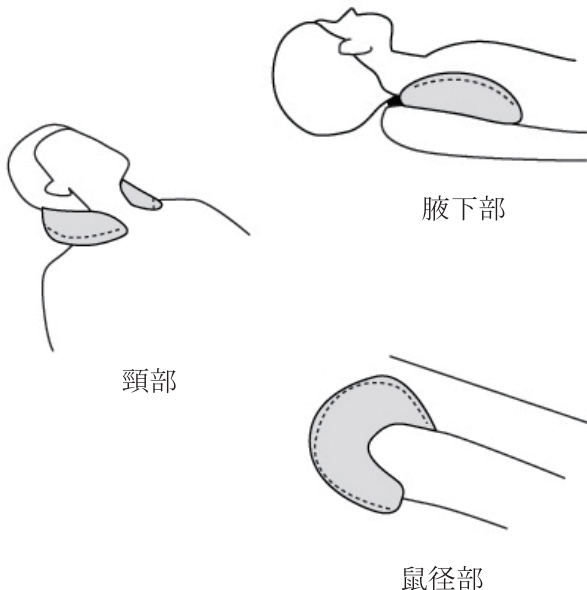

### 【耐久性】

本品の耐久性はご使用条件にもよりますが、安全にご使用いただくには約6ヶ月を目安としてください。  
長期間のご使用で内容物の強度に変化が生じても冷却性能は変わりませんが、使用感が損なわれますので、新しい製品へのお取り換えをお勧め致します。



### 【使用上の注意】

#### 1. 安全にご使用頂く為に以下にご注意ください

- 凍傷を防ぐ為に以下の様な使用はしないでください。
  - ・冷却直後の本品を直接肌に当てての使用。
  - ・本品のフィルム破損や、内容物が漏れ出している時の使用。  
(ご使用前には破損等の無いことを十分にご確認ください。)
  - ・長時間のご使用は凍傷になる場合がありますのでご注意ください。
- 肌の弱い方、本品をすぐに取り外せない方へのご使用は十分にご注意ください。
- 本品の使用により異常が認められたときには、医師にご相談ください。
- 次の様な症状のある方は症状の進行や凍傷の恐れがありますので、ご使用にならないでください。  
(温感・痛覚障害、虚血部位(動脈閉塞))

#### 2. 本品の破損、劣化を防ぐため、以下の行為をおやめ下さい。

- 液体窒素やドライアイスでの冷却。
- 加熱しての使用。
- 落下、突刺し、衝撃などを加える。
- 背中、腰等の下に敷いて荷重をかける。
- 薬剤、油類への接触。

#### 3. その他

- 汚れなどは水や中性洗剤等で洗い、清潔に管理してご使用ください。
- 本品を廃棄する場合は、各市町村のごみ処理規定に準じてください。(一般的には不燃物として廃棄処理してください。)

三重化学工業株式会社

〒515-0001 三重県松阪市大口町 262-1 TEL 0598-51-2361 / FAX 0598-51-1143

ホームページ URL <http://www.miekagaku.co.jp>