

タオルウォーマーで
温めるから
安全・簡単・低コスト

- + バリア性に優れた
抗菌アルミフィルム
- + 柔らかく身体にフィット

保温時間
4~5時間

Barrier Hot **medical**
バリアホット

タオルウォーマーで温める温熱剤

一般医療機器 温熱剤/日本製 カバー/中国製

ガン性疼痛
の緩和

排便・排ガス
の促進

血管痛の
緩和

血管拡張



バリアホット



バリアホット・ハーフ



バリアホット・ダブル

三重化学工業株式会社

〒515-0001 三重県松阪市大町262番地
TEL.(0598)51-2361 FAX.(0598)51-1143
MAIL.info@miekagaku.co.jp



バリアホット



サイズ(mm)	重量(g)	定価(税抜)	1ケース 当たりの入数
180×260	700	1,800	10
届け出番号		JANコード	
24B3X00004000004		4978797400128	

- 大きなサイズなので広い面を身体に当てて使えます。



肘や肩など
広い部位に

バリアホット・ハーフ



サイズ(mm)	重量(g)	定価(税抜)	1ケース 当たりの入数
110×260	300×2	2,000	10
届け出番号		JANコード	
24B3X00004000012		4978797400234	

- 腕や脚に使用しやすいスリムなサイズ。
- 2個組なので両脇に当てるなど効果的に使用できます。



腕や脚に

パック2個+専用カバー2個


バリアホット・ダブル



サイズ(mm)	重量(g)	定価(税抜)	1ケース 当たりの入数
180×260	700×2	3,600	6
届け出番号		JANコード	
24B3X00004000013		4978797400241	

- 身体にしっかりと固定できる専用カバー付き。

専用カバーを
使用して
様々な部位に

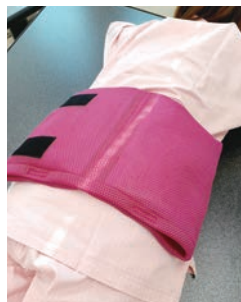

広げて腰に当てて



筒状にして手を入れて



肩に掛けて

パック2個+専用カバー

使用方法 電子レンジや湯煎等のご使用できません。タオルウォーマー専用です。

- ① タオルウォーマーの電源を入れてください。
- ② タオルウォーマーが温まったらバリアホットを庫内に入れ3～4時間ほど温めてください。
- ③ タオルウォーマーの能力・バリアホットの数量によって適温までの加熱時間は変化しますので、温かさを確認しながら加熱してください。
- ④ 加熱されたバリアホットを取り出し、付属のカバーに入れてください。
※加熱された本品を取り出す際、付属のカバーに入れる際には火傷をしないようご注意ください。
※カバーに入れる前に本品に破損、液漏れが無い確認してください。
- ⑤ カバーに入れたバリアホットを、患部にあてがい、適宜の時間患部を温めてください。
- ⑥ 使用後はカバーから取り出し、汚れ、破損等の確認を行った後タオルウォーマーで再度加熱してください。
※続けてご使用にならない場合は、汚れ、破損等の確認後、本品が十分冷めてから冷暗所に保管してください。