



ラルル

Lulle

HOT & COOL PACK series


女性の心とカラダをととのえる

冷温兼用のジェルを使用し、子宮、背中、首、肩、手首、足首、胸などを冷やしたり温めたりすることができます。

子宮を温める「温活」。

生理痛時に身体をじんわり温めます。

産後の会陰切開の痛み、痔の痛みには冷凍庫で冷やして使えます。

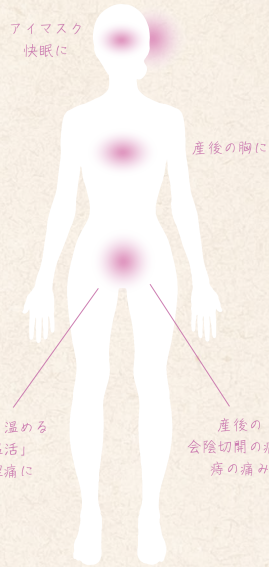

ふんわりと肌に優しい専用カバー
綿 100%

保管用のチャック袋付き
電子レンジで温めるための不織布袋付き

パープル グレー

■材質 (内容物)水、不凍液、調整剤、CMC、防腐剤、着色剤、(本体袋)ナイロン、ポリエチレン、(カバー)綿100%



鈴蘭 suzuran 5連結 HOT & COOL パック

- 品番 Lul-001
- サイズ W100×H550mm
- 重量 約600g
- JANコード パープル:4978797400371
- グレー :4978797400340
- 定価 ¥2,700 (税別)



向日葵 himawari まめ型 HOT & COOL パック

- 品番 Lul-002
- サイズ W90×H185mm
- 重量 約120g
- JANコード パープル:4978797400357
- グレー :4978797400326
- 定価 ¥2,250 (税別)



桔梗 kikyo 陰部用 HOT & COOL パック

- 品番 Lul-003
- サイズ W70×H180mm
- 重量 約90g
- JANコード パープル:4978797400364
- グレー :4978797400333
- 定価 ¥2,250 (税別)

三重化学工業株式会社 mie

〒515-0001 三重県松阪市大町255-1
TEL 0598-51-2361 FAX 0598-51-1143

<http://www.miekagaku.co.jp/>



医療機器メーカーが考えた
女性のためのケアグッズ



ラルル

Lulle

HOT & COOL PACK series



子宮やお腹、背中の温めに

パープル



グレー

suzuran

鈴蘭

5連結 HOT & COOL PACK

子宮、背中、首、肩、手首、足首、胸などを冷やしたり温めたりすることができます。急な発汗時にも使えます。



5連結パック



ジェルパックに取扱方法がプリントされています



カバーにパックを入れて使います



5連結の長いパックが肩やお腹を包みこむ

- Cool** 冷凍庫で3時間以上冷却してください
- Hot** 70℃前後のお湯で10分湯煎してください
推奨は湯煎加熱ですが、電子レンジでの温めも出来ます

耳の後ろや産後の胸に

パープル



グレー

himawari

向日葵

まめ型 HOT & COOL PACK

耳の後ろを温めて快眠を促し、アイマスクとしても使えます。胸やリンパにもフィットする形状です。急な発汗時にも使えます。




まめ型パック



ジェルパックに取扱方法がプリントされています



カバーにパックを入れて使います

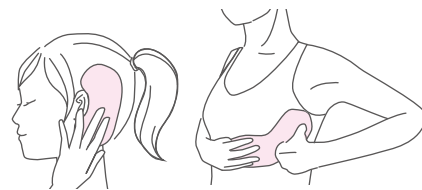

耳の後ろに

温めて胸やリンパに

- Cool** 冷凍庫で3時間以上冷却してください
- Hot** 電子レンジ 500W又は600Wで30秒加熱してください

デリケートゾーンの痛みに

パープル



グレー

kikyo

桔梗

陰部用 HOT & COOL PACK

子宮を温める「温活」、生理痛時に。身体をじんわり温めます。冷やして産後の会陰切開や痔の痛みにも使えます。




陰部用パック



ジェルパックに取扱方法がプリントされています



カバーにパックを入れて使います

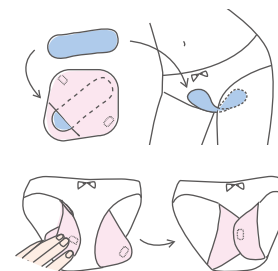

パックをカバーに入れてショーツにセット

- Cool** 冷凍庫で3時間以上冷却してください
- Hot** 電子レンジ 500W又は600Wで20秒加熱してください