

「くるっとクール」取り扱いにあたって

商品の添付文書や取扱説明書に記載のある注意事項以外での、考え得るトラブルについて想定をしてみたので、下記に明記させて頂きます。

- 製品重量が重たく、またボリュームを持たせる為にフィルムに目一杯ジェルを充填しておりますので、落下や衝撃によりフィルムが破損しやすくなっています。
- 冷たさが強いと感じた時はタオルを巻くなどして調整して下さい。
凍傷の恐れがあります。
- 頸部に使用する際はベルトをしないで下さい。首を絞める可能性があります。
- 頸部に使用する際、逆側に乗せると窒息する恐れがあります。
- 大腿部、腋下部に使用する際はベルトの締め過ぎにはご注意下さい。
うっ血する恐れがあります。
- 大腿部、腋下部に使用する際、痩せている方等は製品の重さによりうっ血する恐れがあります。
- 足の上に落とさない様にご注意下さい。製品重量が重たく、落下時の衝撃でケガをする恐れがあります。
- くるっとクールが破損し内容物が皮膚に付着した際は、流水で洗い流して下さい。また、シーツなどに付着した際は水色に色写りする可能性があるので、早急に洗い流して下さい。
※内容物に付きましては、安全性の高い物で出来ておりますのでご安心下さい。
- 小さなお子様にご使用する場合は看護師の管理の元でご使用下さい。

ご使用して頂く中で、新たな注意点が出てくるかもしれません、弊社商品を宜しくお願い致します。