今月のPick UP

快適・安心・清潔 整形外科やカイロ・整体で! 一般医療機器



ホットパック-mie

寒い日が続いています。

寒くなると、腰が痛い、肩が痛い、首が、膝が・・・・・ いろいろなところが痛くなります。

お風呂で温まったり、温湿布などで温めたりしますが 整形外科やカイロ、整体などで治療されます。 整形外科などで活躍するのが、この『ホットパックーmie』です。

1保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットだから快適。

②柔軟性耐熱フィルム使用で安心。

③表装フィルムは洗浄が簡単。防力ビ加工も施してあるので清潔。

そして

④選べる3タイプだから使い方もいろいろ。

く使用方法>

- ①加温槽に65℃~75℃に温めたお湯をご用意ください。
- ②お湯の温度を 65° C~75 $^{\circ}$ Cに保ち、本品をお湯に沈め10分~25分間温めてください。
- ③本品に損傷など無く液漏れが無いことを確認し、タオルなどで包み幹部にあてがい適宜時間 (15分~25分)患部を温めてください。火傷しないように、十分ご注意ください。
- ④取扱いに際しましては、取扱い説明書をよくお読みください。

ご使用方法、販売方法など弊社営業担当者までお問い合わせください。 TEL 0598-51-2361(久保まで)







ホットパック - mie