

バリアホット

取扱説明書

ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。


【特徴】

- タオルウォーマーで温めるだけで使用できます。
- 柔軟に身体にフィットし、心地よい温熱を放出します。
- 保温性に優れた内容物を使用しています。
- タオルウォーマーで保温出来る耐熱性・耐バリア性に優れたフィルムを使用しています。
- 長時間加熱使用しても硬化・収縮・変形等のフィルム物性変化が少なく、重量減や風合いはほとんど変わりません。
- フィルムは抗菌加工を施し、清潔に使用できます。

【使用方法】

- タオルウォーマーの電源を入れてください。
タオルウォーマーが温まったらバリアホットを庫内に入れ3~4時間ほど温めてください。
- タオルウォーマーの能力・バリアホットの数量によって適温までの加熱時間は変化しますので、温かさを確認しながら加熱してください。
- 加熱する際は付属のカバーは外してください。
- 加熱されたバリアホットを取り出し、付属のカバーに入れてください。
※加熱された本品を取り出す際には火傷をしないようにご注意ください。
※カバーに入れる前に本品に破損、液漏れが無い確認してください。
- カバーに入れたバリアホットを、患部にあてがい、適宜の時間患部を温めてください。
- 使用後は付属のカバーから取り出し、汚れ、破損等の確認を行った後タオルウォーマーで再度加熱してください。
- 続けてご使用にならない場合は、汚れ、破損等の確認後、本品が十分冷めてから冷暗所にて保管してください。

【使用例】

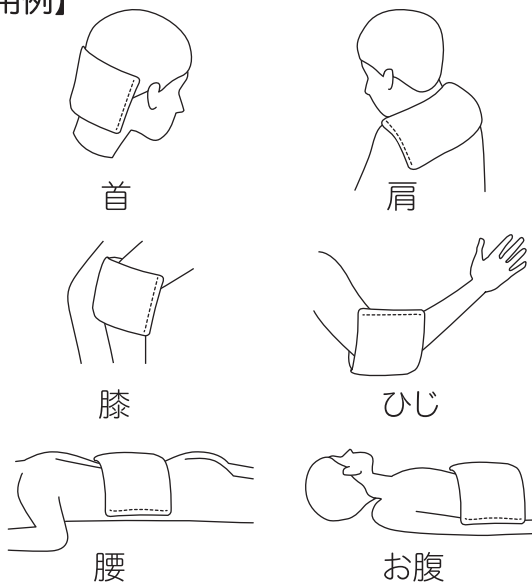

【耐久性】

本品の耐久性はご使用条件にもよりますが、安全にご使用いただくには約6ヶ月を目安としてください。

長期間のご使用で内容物の粘度が低下しても保温性能は変わりませんが、使用感が損なわれますので、新しい製品へのお取り換えをお勧め致します。



【使用上の注意】

1. 安全にご使用頂く為に以下にご注意ください

- 火傷を防ぐ為に以下の様な使用はしないでください。
 - ・直接皮膚にあてての使用。
 - ・本品のフィルム破損や、内容物が漏れ出している時の使用。(ご使用前には破損等の無いことを十分にご確認ください。)
 - ・長時間のご使用は低温火傷になる場合がありますのでご注意ください。(41℃にて1時間以上の皮膚直接の加熱は低温火傷になる場合があります。)
- 肌の弱い方、本品をすぐに取り外せない方へのご使用は十分にご注意ください。
- 本品の使用により火傷など異常が認められたときには、医師にご相談ください。
- 次の様な症状のある方は症状の進行や火傷の恐れがありますので、ご使用にならないでください。(急性炎症、温感・痛覚障害、出血、非炎症性浮腫、虚血部位(動脈閉塞))
- 付属のカバーに入れたままタオルウォーマーで加熱しないでください。
- タオルウォーマーからの取り出しや、カバーへの出し入れの際、火傷にご注意ください。

2. 本品の破損、劣化を防ぐため、以下の行為をおやめ下さい。

- 電子レンジ、ガスレンジ、乾燥機、IHヒーター、及び湯煎での加熱
- 冷凍庫・冷蔵庫での冷却
- 落下、突刺し、衝撃などを加える。
- 背中、腰等の下に敷いて荷重をかける。
- 折り曲げての使用。
- 薬剤、油類への接触

3. その他

- 本品は抗菌フィルムを使用していますが、汚れなどは水や中性洗剤等で洗い、清潔に管理してご使用ください。
- 本品を廃棄する場合は、各市町村のごみ処理規定に準じてください。(一般的には不燃物として廃棄処理してください)

三重化学工業株式会社

〒515-0001 三重県松阪市大町262-1 TEL 0598-51-2361 / FAX 0598-51-1143

ホームページURL <http://www.miekagaku.co.jp>