

取扱説明書

ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。

急性期冷却剤 アイシングフィットG

【特徴】


- 冷凍庫で冷却するだけで使用できます。
- 冷却しても柔軟性を保つゲルで患部に柔軟にフィットします。
- 関節、脚、腕、指等にフィットする形状で、患部をしっかりと冷却します。
- 冷却性に優れた内容物を使用しています。

【使用方法】

- 冷凍庫の電源を入れてください。
冷凍庫が冷えたらアイシングフィットGを庫内に入れ3～4時間ほど冷却してください。
- 冷凍庫の能力・アイシングフィットGの数量によって適温までの冷却時間は変化しますので、冷たさを確認しながら冷却してください。
- 冷却されたアイシングフィットGを取り出し、破損、液漏れが無いか確認してください。
- アイシングフィットGを、てぬぐい等で巻いてください。
- てぬぐい等で巻いたアイシングフィットGを患部に当てがい、適宜の時間患部を冷却してください。
※てぬぐい等を巻かず直接肌に当てて使用する場合は医師の管理のもと、凍傷に十分注意してご使用ください。
- 使用後は汚れ、破損等の確認を行った後冷凍庫で再度冷却してください。
- 続けてご使用にならない場合も、汚れ、破損等の確認後、冷凍庫にて保管して下さい。

【使用例】

ご使用の際は、てぬぐいやタオルを患部に当て、フリーサポーター等で固定してご使用下さい。

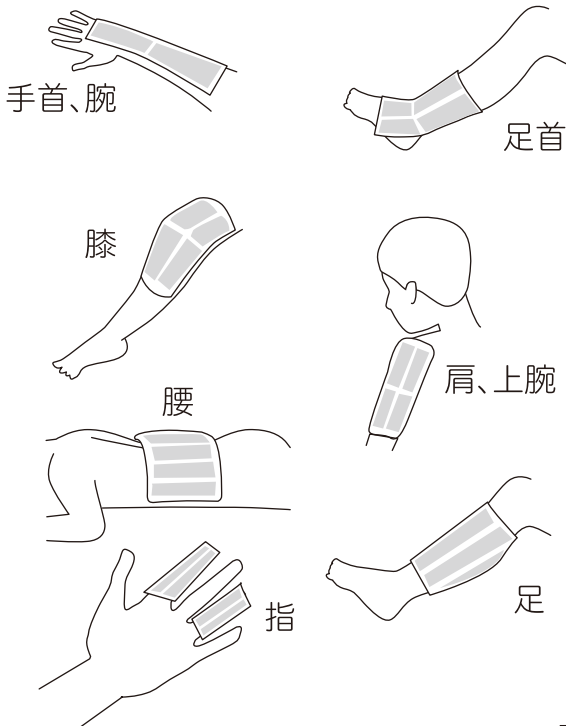

【耐久性】

本品の耐久性はご使用条件にもよりますが、安全にご使用いただくには約6ヶ月を目安としてください。
長期間のご使用で内容物の強度に変化が生じても冷却性能は変わりませんが、使用感が損なわれますので、新しい製品へのお取り換えをお勧め致します。



【使用上の注意】

1. 安全にご使用頂く為に以下にご注意ください

- 凍傷を防ぐ為に以下の様な使用はしないでください。
 - ・冷凍庫から取り出した直後に本品を直接肌に当てての使用。
(直接肌に当てて使用する場合は医師の管理のもと、凍傷に十分注意してご使用ください。)
 - ・本品のフィルム破損や、内容物が漏れ出している時の使用。
(ご使用前には破損等の無いことを十分にご確認ください。)
 - ・長時間のご使用は凍傷になる場合がありますのでご注意ください。
- 肌の弱い方、本品をすぐに取り外せない方へのご使用は十分にご注意ください。
- 本品の使用により異常が認められたときには、医師にご相談ください。
- 次の様な症状のある方は症状の進行や凍傷の恐れがありますので、ご使用にならないでください。
(温感・痛覚障害、虚血部位(動脈閉塞))

2. 本品の破損、劣化を防ぐため、以下の行為をおやめ下さい。

- 液体窒素やドライアイスでの冷却。
- 加熱しての使用。
- 落下、突刺し、衝撃などを加える。
- 背中、腰等の下に敷いて荷重をかける。
- 薬剤、油類への接触。
- 関節用Mサイズ、関節用Lサイズ、連結タイプは半固形のゲル剤を使用しておりますので、強く押さえつけたり、握るなどの負荷をかけるとゲル剤が断裂する可能性があります。ゲルが断裂しても使用は可能ですが、フィット感が損なわれる可能性がありますのでご注意ください。

3. その他

- 汚れなどは水や中性洗剤等で洗い、清潔に管理してご使用ください。
- 本品を廃棄する場合は、各市町村のごみ処理規定に準じてください。(一般的には不燃物として廃棄処理してください。)

三重化学工業株式会社

〒515-0001 三重県松阪市大町262-1 TEL 0598-51-2361 / FAX 0598-51-1143

ホームページURL <http://www.miekagaku.co.jp>