

取扱説明書

ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。

ぶる CURE アイスパック

【特徴】

- 冷凍庫で冷却するだけで使用できます。
- 冷却しても柔軟性を保つゲルで患部に柔軟にフィットします。
- ゲルを包む袋に「クリスタルゲル®」を使用している為、従来のフィルムタイプの様にパックの端が痛くなく、身体に優しくフィットします。
- 冷却性に優れた内容物を使用しています。


【使用方法】

- 冷凍庫の電源を入れて下さい。
冷凍庫が冷えたら「ぶる CURE アイスパック」を付属のアルミ袋に入れ、冷凍庫内で3~4時間ほど冷却して下さい。
- 冷凍庫の能力や「ぶる CURE アイスパック」の数量によって冷却時間は変化しますので、冷たさを確認しながら冷却して下さい。
- 冷却された「ぶる CURE アイスパック」を取り出し、破損、液漏れが無いかな確認して下さい。
- 「ぶる CURE アイスパック」をタオルやガーゼに包み、患部にあてがい適宜の時間患部を冷却して下さい。
※直接肌に当てて使用する場合は医師の管理のもと、凍傷に十分注意してご使用下さい。

【保管方法】

- 使用後は汚れ・破損等の確認を行った後、付属のアルミ袋に入れ冷凍庫で再度冷却して下さい。
- 続けてご使用にならない場合、汚れ、破損等の確認後、付属のアルミ袋に入れて保管して下さい。

【使用例】

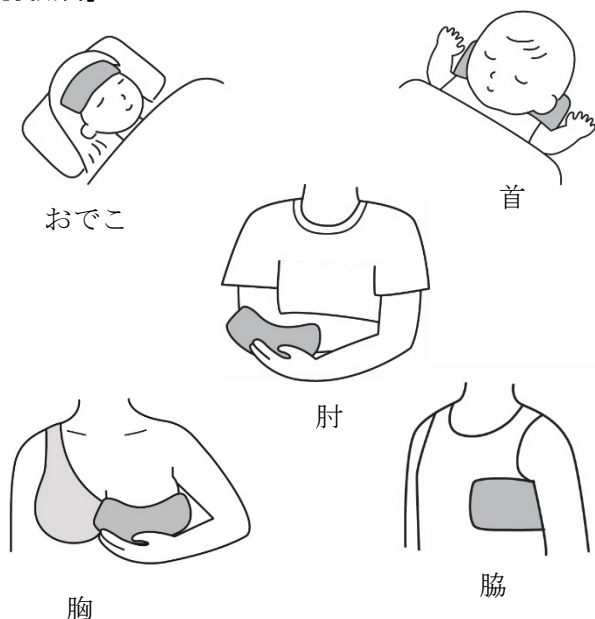

【耐久性】

本品の耐久性はご使用条件にもよりますが、安全にご使用いただくには約3ヶ月を目安として下さい。
長期間のご使用で冷却性能や使用感が損なわれますので、新しい製品へのお取り換えをお勧め致します。



【使用上の注意】

1. 安全にご使用頂く為に以下にご注意下さい

- 凍傷を防ぐ為に以下の様な使用はしないで下さい。
 - ・冷却直後の本品を直接肌に当てての使用。
 - ・本品のフィルム破損や、内容物が漏れ出している時の使用。
(ご使用前には破損等の無いことを十分にご確認下さい)
 - ・長時間のご使用は凍傷になる場合がありますのでご注意下さい。
- 肌の弱い方、本品をすぐに取り外せない方へのご使用は十分にご注意下さい。
- 本品の使用により異常が認められたときには、医師にご相談下さい。
- 次の様な症状のある方は症状の進行や凍傷の恐れがありますので、ご使用にならないで下さい。
(温感・痛覚障害、虚血部位(動脈閉塞))

2. 本品の破損、劣化を防ぐため、以下の行為をおやめ下さい。

- 液体窒素やドライアイスでの冷却。
- 加熱しての使用。
- 落下、突刺し、衝撃などを加える。
- 背中、腰等の下に敷いて荷重をかける。
- 薬剤、油類への接触。
- トルエン、キシレン等の溶剤で拭き取る行為。
- 業務用冷凍庫など、-20℃以下での冷却。
- 「ぶる CURE アイスパック」は非常に良く伸び・変形しますが、必要以上に引っ張る・強く押さえつける・握る・局部的に圧を掛けるなどの行為。

3. その他

- 冷凍庫に入れ続ける事で表面にヌメリが出る事がありますが、人体への害はありません。中性洗剤で洗いご使用下さい。
- 汚れなどは水や中性洗剤等で洗い、清潔に管理してご使用下さい。
- 本品を廃棄する場合は、各市町村のごみ処理規定に準じて下さい。(一般的には可燃物として廃棄処理して下さい)

三重化学工業株式会社

〒515-0001 三重県松阪市大口町 262-1 TEL 0598-51-2361 / FAX 0598-51-1143

ホームページ URL <http://www.miekagaku.co.jp>